

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-055	PS/SSP/131460
PRODUCTO Fresas Maxima Diamond. Ver lista de referencias afectadas en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Desgaste, tallado y acabado de tejidos duros dentales y de materiales restauradores, utilizando partículas de diamante.	
FABRICANTE Henry Schein Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Henry Schein España, S.A.U., Av. Albufera 153, 8ª planta, 28038 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas fresas Maxima Diamond, debido a que la instalación incorrecta o el uso de fuerza excesiva durante la utilización pueden aumentar la probabilidad de desprendimiento de la fresa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.



Fecha: 03/11/2025

URGENTE: NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO (FSN)

Empresa Fabricante: Henry Schein Inc.

Product Description	Product Identifiers
Maxima Diamond Burs	Consultar Apéndice A: lista de referencias afectadas (Páginas 3-18)

Henry Schein Inc. está iniciando esta Notificación de Seguridad en el Campo para informarle sobre una actualización importante de las Instrucciones de Uso (IFU) de nuestras Fresas Maxima Diamond. Esta actualización proporciona orientación mejorada sobre la correcta instalación y la aplicación de fuerza recomendada durante el uso, con el fin de reducir el riesgo de desprendimiento de la fresa durante los procedimientos con pacientes. Las IFU actualizadas no alteran el diseño ni la funcionalidad del dispositivo. Las IFU actualizadas (Anexo A) se incluyen con esta notificación y se aplican a los dispositivos listados en el Apéndice A (páginas 3–18). Riesgo para la Salud: La instalación incorrecta o el uso de fuerza excesiva durante la utilización pueden aumentar la probabilidad de desprendimiento de la fresa. Esto puede resultar en un posible daño al paciente, incluyendo:

- Lesión Oral
- Aspiración
- Ingestión

La ausencia de orientación específica en las IFU anteriores se identificó como un factor que contribuye a este riesgo. Hasta la fecha, Henry Schein Inc. ha recibido un (1) informe de evento adverso relacionado con este problema.

ACCIÓN:

1. Revise el inventario para confirmar si algún producto afectado se encuentra en su posesión.
2. Si se localizan dispositivos afectados, asegúrese de que todos los clínicos tengan disponibles las IFU actualizadas.
3. Complete, firme, feche y devuelva el Formulario de Respuesta de Henry Schein adjunto, confirmando la recepción de la notificación a ESAttcliente@henryschein.es.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre este asunto, por favor comuníquese con Henry Schein España a través del teléfono y/o email

Gracias por su atención en este asunto.

Atentamente,

Departamento Atención al Cliente

Document Number: 8.3.08 T2 Rev. 2
4.2.01 T4 Rev.0 Template

Control# 7615

Page 1 of 18

URGENTE: NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL CAMPO Formulario de Respuesta de Henry Schein**REENVIE LAS RESPUESTAS A:****Email** ESAttcliente@henryschein.es

☐ Hemos leído y comprendemos la información que se nos ha proporcionado y seguiremos las instrucciones necesarias para asegurar que se tomen las acciones adecuadas.

☐ Actualmente NO tenemos el producto/lote especificado. Por lo tanto, no estamos afectados por esta notificación.

Nombre y Cargo

Clinica y dirección de envío

Signature Date

Apendice A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2700	Maxima 368-016C FG	368-016C FG	ALL LOTS
878-2701	Maxima 368-016F FG	368-016F FG	
878-2702	Maxima 368-016M FG	368-016M FG	
878-2703	Maxima 368-016SF FG	368-016SF FG	
878-2704	Maxima 368-016UF FG	368-016UF FG	
878-2705	Maxima 368-023C FG	368-023C FG	
878-2706	Maxima 368-023F FG	368-023F FG	
878-2707	Maxima 368-023M FG	368-023M FG	
878-2708	Maxima 368-023SC FG	368-023SC FG	
878-2709	Maxima 368-023SF FG	368-023SF FG	
878-2710	Maxima 369-025F FG	369-025F FG	
878-2711	Maxima 369-025M FG	369-025M FG	
878-2712	Maxima 379-012F FG	379-012F FG	
878-2713	Maxima 379-014F FG	379-014F FG	
878-2714	Maxima 379-014M FG	379-014M FG	
878-2715	Maxima 379-016F FG	379-016F FG	
878-2716	Maxima 379-016M FG	379-016M FG	
878-2717	Maxima 379-018M FG	379-018M FG	
878-2718	Maxima 379-023C FG	379-023C FG	
878-2719	Maxima 379-023F FG	379-023F FG	
878-2720	Maxima 379-023M FG	379-023M FG	
878-2721	Maxima 379-023SF FG	379-023SF FG	
878-2722	Maxima 392-016M FG	392-016M FG	
878-2723	Maxima 801-009M FG	801-009M FG	
878-2724	Maxima 801-010M FG	801-010M FG	
878-2725	Maxima 801-012C FG	801-012C FG	
878-2726	Maxima 801-012M FG	801-012M FG	
878-2727	Maxima 801-014C FG	801-014C FG	
878-2728	Maxima 801-014M FG	801-014M FG	
878-2729	Maxima 801-014SC FG	801-014SC FG	
878-2730	Maxima 801-016C FG	801-016C FG	
878-2731	Maxima 801-016M FG	801-016M FG	
878-2732	Maxima 801-016SC FG	801-016SC FG	
878-2733	Maxima 801-018C FG	801-018C FG	
878-2734	Maxima 801-018M FG	801-018M FG	
878-2735	Maxima 801-021C FG	801-021C FG	
878-2736	Maxima 801-021M FG	801-021M FG	
878-2737	Maxima 801-023C FG	801-023C FG	
878-2738	Maxima 801-023F FG	801-023F FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2739	Maxima 801-023M FG	801-023M FG	ALL LOTS
878-2740	Maxima 801-023SC FG	801-023SC FG	
878-2741	Maxima 801-023SF FG	801-023SF FG	
878-2742	Maxima 801-029F FG	801-029F FG	
878-2743	Maxima 801-029M FG	801-029M FG	
878-2744	Maxima 801L-016C FG	801L-016C FG	
878-2745	Maxima 801L-016M FG	801L-016M FG	
878-2746	Maxima 802-009M FG	802-009M FG	
878-2747	Maxima 802-010M FG	802-010M FG	
878-2748	Maxima 802-012C FG	802-012C FG	
878-2749	Maxima 802-012M FG	802-012M FG	
878-2750	Maxima 802-014C FG	802-014C FG	
878-2751	Maxima 802-014M FG	802-014M FG	
878-2752	Maxima 802-016M FG	802-016M FG	
878-2753	Maxima 802-018M FG	802-018M FG	
878-2754	Maxima 802-023M FG	802-023M FG	
878-2755	Maxima 805-009M FG	805-009M FG	
878-2756	Maxima 805-010M FG	805-010M FG	
878-2757	Maxima 805-012C FG	805-012C FG	
878-2758	Maxima 805-012M FG	805-012M FG	
878-2759	Maxima 805-014C FG	805-014C FG	
878-2760	Maxima 805-014M FG	805-014M FG	
878-2761	Maxima 805-016M FG	805-016M FG	
878-2762	Maxima 805-018C FG	805-018C FG	
878-2763	Maxima 805-018M FG	805-018M FG	
878-2764	Maxima 805-023M FG	805-023M FG	
878-2766	Maxima 806-010M FG	806-010M FG	
878-2767	Maxima 806-012M FG	806-012M FG	
878-2768	Maxima 806-014M FG	806-014M FG	
878-2769	Maxima 806-016M FG	806-016M FG	
878-2770	Maxima 806-018M FG	806-018m FG	
878-2771	Maxima 807-012M FG	807-012M FG	
878-2772	Maxima 807-016M FG	807-016M FG	
878-2773	Maxima 807-018M FG	807-018M FG	
878-2774	Maxima 813-010M FG	813-010M FG	
878-2775	Maxima 813-014M FG	813-014M FG	
878-2776	Maxima 813-016M FG	813-016M FG	
878-2777	Maxima 813-018M FG	813-018M FG	
878-2778	Maxima 815-012M FG	815-012M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2781	Maxima 825-023M FG	825-023M FG	ALL LOTS
878-2782	Maxima 830-009M FG	830-009M FG	
878-2783	Maxima 830-010C FG	830-010C FG	
878-2784	Maxima 830-010M FG	830-010M FG	
878-2785	Maxima 830-012C FG	830-012C FG	
878-2786	Maxima 830-012M FG	830-012M FG	
878-2787	Maxima 830-014C FG	830-014C FG	
878-2788	Maxima 830-014M FG	830-014M FG	
878-2789	Maxima 830-016C FG	830-016C FG	
878-2790	Maxima 830-016M FG	830-016M FG	
878-2791	Maxima 830L-012C FG	830L-012C FG	
878-2792	Maxima 830L-012M FG	830L-012M FG	
878-2793	Maxima 830L-014C FG	830L-014C FG	
878-2794	Maxima 830L-014F FG	830L-014F FG	
878-2795	Maxima 830L-014M FG	830L-014M FG	
878-2796	Maxima 830L-016C FG	830L-016C FG	
878-2797	Maxima 835-008M FG	835-008M FG	
878-2798	Maxima 835-009C FG	835-009C FG	
878-2799	Maxima 835-009M FG	835-009M FG	
878-2800	Maxima 835-010C FG	835-010C FG	
878-2801	Maxima 835-010M FG	835-010M FG	
878-2802	Maxima 835-012C FG	835-012C FG	
878-2803	Maxima 835-012M FG	835-012M FG	
878-2804	Maxima 835-014C FG	835-014C FG	
878-2805	Maxima 835-014F FG	835-014F FG	
878-2806	Maxima 835-014M FG	835-014M FG	
878-2807	Maxima 835-016M FG	835-016M FG	
878-2808	Maxima 835KR-010M FG	835KR-010M FG	
878-2809	Maxima 836-012C FG	836-012C FG	
878-2810	Maxima 836-012M FG	836-012M FG	
878-2811	Maxima 836-014C FG	836-014C FG	
878-2812	Maxima 836-014M FG	836-014M-FG	
878-2813	Maxima 836-014SC FG	836-014SC FG	
878-2814	Maxima 836-018C FG	836-018C FG	
878-2815	Maxima 836KR-012M FG	836KR-012M FG	
878-2816	Maxima 837-012C FG	837-012C FG	
878-2817	Maxima 837-012F FG	837-012F FG	
878-2818	Maxima 837-012M FG	837-012M FG	
878-2819	Maxima 837-014C FG	837-014C FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2820	Maxima 837-014M FG	837-014M FG	ALL LOTS
878-2821	Maxima 837-014SC FG	837-014SC FG	
878-2822	Maxima 837-016C FG	837-016C FG	
878-2823	Maxima 837-016M FG	837-016M FG	
878-2824	Maxima 837KR-012C FG	837KR-012C FG	
878-2825	Maxima 837KR-012M FG	837KR-012M FG	
878-2826	Maxima 838-008M FG	838-008M FG	
878-2827	Maxima 838-009M FG	838-009M FG	
878-2828	Maxima 838-010M FG	838-010M FG	
878-2829	Maxima 838-012C FG	838-012C FG	
878-2830	Maxima 838-012M FG	838-012M FG	
878-2832	Maxima 839-012M FG	839-012M FG	
878-2833	Maxima 845-010M FG	845-010M FG	
878-2834	Maxima 845-012C FG	845-012C FG	
878-2835	Maxima 845-012M FG	845-012M FG	
878-2836	Maxima 845-014C FG	845-014C FG	
878-2837	Maxima 845-014M FG	845-014M FG	
878-2838	Maxima 845-016M FG	845-016M FG	
878-2839	Maxima 845KR-016M FG	845KR-016M FG	
878-2840	Maxima 846-012C FG	846-012C FG	
878-2841	Maxima 846-012M FG	846-012M FG	
878-2842	Maxima 846W-016C FG	846-016C FG	
878-2843	Maxima 846W-016M FG	846-016M FG	
878-2844	Maxima 847-012C FG	847-012C FG	
878-2845	Maxima 847-012F FG	847-012F FG	
878-2846	Maxima 847-012M FG	847-012M FG	
878-2847	Maxima 847-014M FG	847-014M FG	
878-2848	Maxima 847-014SC FG	847-014SC FG	
878-2849	Maxima 847-016C FG	847-016C FG	
878-2850	Maxima 847-016F FG	847-016F FG	
878-2851	Maxima 847-016M FG	847-016M FG	
878-2852	Maxima 847-016SC FG	847-016SC FG	
878-2853	Maxima 847KR-016C FG	847KR-016C FG	
878-2854	Maxima 847KR-016F FG	847KR-016F FG	
878-2855	Maxima 847KR-016M FG	847KR-016M FG	
878-2856	Maxima 848-014M FG	848-014M FG	
878-2857	Maxima 848-016C FG	848-016C FG	
878-2858	Maxima 848-016F FG	848-016F FG	
878-2859	Maxima 848-016M FG	848-016M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2860	Maxima 848-016SC FG	848-016SC FG	ALL LOTS
878-2861	Maxima 848-018C FG	848-018C FG	
878-2862	Maxima 848-018M FG	848-018M FG	
878-2863	Maxima 848-023C FG	848-023C FG	
878-2864	Maxima 849-012C FG	849-012C FG	
878-2865	Maxima 849-012M FG	849-012M FG	
878-2866	Maxima 849-016C FG	849-016C FG	
878-2867	Maxima 850-012F FG	850-012F FG	
878-2868	Maxima 850-012M FG	850-012M FG	
878-2869	Maxima 850-014C FG	850-014C FG	
878-2870	Maxima 850-014F FG	850-014F FG	
878-2871	Maxima 850-014M FG	850-014M FG	
878-2872	Maxima 850-016C FG	850-016C FG	
878-2873	Maxima 850-016M FG	850-016M FG	
878-2874	Maxima 850-016SC FG	850-016SC FG	
878-2875	Maxima 850W-018M FG	850W-018M FG	
878-2876	Maxima 850W-018SC FG	850W-018SC FG	
878-2877	Maxima 851-012M FG	851-012M FG	
878-2878	Maxima 852-012F FG	852-012F FG	
878-2879	Maxima 852-012M FG	852-012M FG	
878-2880	Maxima 852-023C FG	852-023C FG	
878-2882	Maxima 855-012M FG	855-012M FG	
878-2883	Maxima 855-014M FG	855-014M FG	
878-2884	Maxima 856-012C FG	856-012C FG	
878-2885	Maxima 856-012F FG	856-012F FG	
878-2886	Maxima 856-012M FG	856-012M FG	
878-2887	Maxima 856-014C FG	856-014C FG	
878-2888	Maxima 856-014F FG	856-014F FG	
878-2889	Maxima 856-014M FG	856-014M FG	
878-2890	Maxima 856-014SC FG	856-014SC FG	
878-2891	Maxima 856-016C FG	856-016C FG	
878-2892	Maxima 856-016F FG	856-016F FG	
878-2893	Maxima 856-016M FG	856-016M FG	
878-2894	Maxima 856-016SC FG	856-016SC FG	
878-2895	Maxima 856-018C FG	856-018C FG	
878-2896	Maxima 856-018F FG	856-018F FG	
878-2897	Maxima 856-018M FG	856-018M FG	
878-2898	Maxima 856-018SC FG	856-018SC FG	
878-2899	Maxima 857-014M FG	857-014M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2900	Maxima 858-012F FG	858-012F FG	ALL LOTS
878-2901	Maxima 858-012M FG	858-012M FG	
878-2902	Maxima 858-012SF FG	858-012SF FG	
878-2903	Maxima 858-014C FG	858-014C FG	
878-2904	Maxima 858-014F FG	858-014F FG	
878-2905	Maxima 858-014M FG	858-014M FG	
878-2906	Maxima 858-014SC FG	858-014SC FG	
878-2907	Maxima 858-014SF FG	858-014SF FG	
878-2908	Maxima 858-016M FG	858-016M FG	
878-2909	Maxima 858-016SC FG	858-016SC FG	
878-2910	Maxima 859-010F FG	859-010F FG	
878-2911	Maxima 859-010M FG	859-010M FG	
878-2912	Maxima 859-010SF FG	859-010SF FG	
878-2913	Maxima 859-014F FG	859-014F FG	
878-2914	Maxima 859-014M FG	859-014M FG	
878-2915	Maxima 859-014SF FG	859-014SF FG	
878-2916	Maxima 859-016SF FG	859-016SF FG	
878-2917	Maxima 859-018C FG	859-018C FG	
878-2918	Maxima 859-018F FG	859-018F FG	
878-2919	Maxima 859-018M FG	859-018M FG	
878-2920	Maxima 859-018SF FG	859-018SF FG	
878-2921	Maxima 860-010C FG	860-010C FG	
878-2922	Maxima 860-010M FG	860-010M FG	
878-2923	Maxima 860-012C FG	860-012C FG	
878-2924	Maxima 860-012F FG	860-012F FG	
878-2925	Maxima 860-012M FG	860-012M FG	
878-2926	Maxima 860-014C FG	860-014C FG	
878-2927	Maxima 860-014M FG	860-014M FG	
878-2928	Maxima 862-010F FG	862-010F FG	
878-2929	Maxima 862-010M FG	862-010M FG	
878-2930	Maxima 862-012C FG	862-012C FG	
878-2931	Maxima 862-012F FG	862-012F FG	
878-2932	Maxima 862-012M FG	862-012M FG	
878-2933	Maxima 862-012SC FG	862-012SC FG	
878-2934	Maxima 862-012SF FG	862-012SF FG	
878-2935	Maxima 862-014C FG	862-014C FG	
878-2936	Maxima 862-014F FG	862-014F FG	
878-2937	Maxima 862-014M FG	862-014M FG	
878-2938	Maxima 862-014SC FG	862-014SC FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2939	Maxima 862-016C FG	862-016C FG	ALL LOTS
878-2940	Maxima 862-016M FG	862-016M FG	
878-2941	Maxima 862-016SC FG	862-016SC FG	
878-2942	Maxima 862-016SF FG	862-016SF FG	
878-2943	Maxima 862-021M FG	862-021M FG	
878-2944	Maxima 863-012C FG	863-012C FG	
878-2945	Maxima 863-012F FG	863-012F FG	
878-2946	Maxima 863-012M FG	863-012M FG	
878-2947	Maxima 863-012SF FG	863-012SF FG	
878-2948	Maxima 863-016C FG	863-016C FG	
878-2949	Maxima 863-016F FG	863-016F FG	
878-2950	Maxima 863-016M FG	863-016M FG	
878-2951	Maxima 863-016SC FG	863-016SC FG	
878-2952	Maxima 863-016SF FG	863-016SF FG	
878-2953	Maxima 864-014M FG	864-014M FG	
878-2954	Maxima 874-009M FG	874-009M FG	
878-2955	Maxima 874K-010M FG	874K-010M FG	
878-2956	Maxima 875K-012M FG	875K-012M FG	
878-2957	Maxima 876-009M FG	876-009M FG	
878-2958	Maxima 876K-012C FG	876K-012C FG	
878-2959	Maxima 876K-012M FG	876K-012M FG	
878-2960	Maxima 877-009M FG	877-009M FG	
878-2961	Maxima 877-010M FG	877-010M FG	
878-2962	Maxima 877-012C FG	877-012C FG	
878-2963	Maxima 877-012M FG	877-012M FG	
878-2964	Maxima 877K-012C FG	877K-012C FG	
878-2965	Maxima 877K-012M FG	877K-012M FG	
878-2966	Maxima 877K-014C FG	877K-014C FG	
878-2967	Maxima 877K-014F FG	877K-014F FG	
878-2968	Maxima 877K-014M FG	877K-014M FG	
878-2969	Maxima 877K-016C FG	877K-016C FG	
878-2970	Maxima 877K-016F FG	877K-016F FG	
878-2971	Maxima 877K-016M FG	877K-016M FG	
878-2972	Maxima 877K-016SC FG	877K-016SC FG	
878-2974	Maxima 878-012C FG	878-012C FG	
878-2975	Maxima 878-012F FG	878-012F FG	
878-2976	Maxima 878-012M FG	878-012M FG	
878-2977	Maxima 878-014F FG	878-014F FG	
878-2978	Maxima 878-014M FG	878-014M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-2979	Maxima 878-014SC FG	878-014SC FG	ALL LOTS
878-2980	Maxima 878-016C FG	878-016C FG	
878-2981	Maxima 878-016F FG	878-016F FG	
878-2982	Maxima 878K-012C FG	878K-012C FG	
878-2983	Maxima 878K-012M FG	878K-012M FG	
878-2984	Maxima 878K-014C FG	878K-014C FG	
878-2985	Maxima 878K-014F FG	878K-014F FG	
878-2986	Maxima 878K-014M FG	878K-014M FG	
878-2987	Maxima 878K-016C FG	878K-016C FG	
878-2988	Maxima 878K-016F FG	878K-016F FG	
878-2989	Maxima 878K-016M FG	878K-016M FG	
878-2990	Maxima 878K-016SC FG	878K-016SC FG	
878-2991	Maxima 878K-018C FG	878K-018C FG	
878-2992	Maxima 878K-018M FG	878K-018M FG	
878-2993	Maxima 878K-018SC FG	878K-018SC FG	
878-2994	Maxima 878K-021C FG	878K-021C FG	
878-2995	Maxima 878K-023C FG	878K-023C FG	
878-2996	Maxima 879-012M FG	879-012M FG	
878-2997	Maxima 879-014C FG	879-014C FG	
878-2998	Maxima 879-014M FG	879-014M FG	
878-2999	Maxima 879-016C FG	879-016C FG	
878-3030	Maxima 879K-012C FG	879K-012C FG	
878-3461	Maxima 846-012F FG	846-012F FG	
878-3503	Maxima 879K-012M FG	879K-012M FG	
878-3504	Maxima 879K-014C FG	879K-014C FG	
878-3505	Maxima 879K-014M FG	879K-014M FG	
878-3506	Maxima 879K-016C FG	879K-016C FG	
878-3507	Maxima 879K-016F FG	879K-016F FG	
878-3508	Maxima 879K-016M FG	879K-016M FG	
878-3509	Maxima 879K-016SC FG	879K-016SC FG	
878-3510	Maxima 879K-018C FG	879K-018C FG	
878-3511	Maxima 879K-018F FG	879K-018F FG	
878-3512	Maxima 879K-018M FG	879K-018M FG	
878-3513	Maxima 879K-018SC FG	879K-018SC FG	
878-3514	Maxima 880-012C FG	880-012C FG	
878-3515	Maxima 881-010M FG	881-010M FG	
878-3516	Maxima 881-012C FG	881-012C FG	
878-3517	Maxima 881-012M FG	881-012M FG	
878-3518	Maxima 881-014M FG	881-014M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3519	Maxima 883-010C FG	883-010C FG	ALL LOTS
878-3520	Maxima 884-012C FG	884-012C FG	
878-3521	Maxima 884-012M FG	884-012M FG	
878-3522	Maxima 885-012C FG	885-012C FG	
878-3523	Maxima 885-012M FG	885-012M FG	
878-3524	Maxima 886-014C FG	886-014C FG	
878-3525	Maxima 886-014M FG	886-014M FG	
878-3526	Maxima 886-016C FG	886-016C FG	
878-3527	Maxima 888-012M FG	888-012M FG	
878-3528	Maxima 889-009C FG	889-009C FG	
878-3529	Maxima 889-009F FG	889-009F FG	
878-3530	Maxima 889-009M FG	889-009M FG	
878-3531	Maxima 889-010C FG	889-010C FG	
878-3532	Maxima 889-010F FG	889-010F FG	
878-3533	Maxima 889-010M FG	889-010M FG	
878-3534	Maxima 889-010SF FG	889-010SF FG	
878-3535	Maxima 899-021M FG	899-021M FG	
878-3536	Maxima 899-027F FG	899-027F FG	
878-3537	Maxima 899-027M FG	899-027M FG	
878-3538	Maxima 801-035F FG	801-035F FG	
878-3539	Maxima 801-035M FG	801-035M FG	
878-3540	Maxima 811-033M FG	811-033M FG	
878-3541	Maxima 811-037M FG	811-037M FG	
878-3543	Maxima 818-035M FG	818-035M FG	
878-3544	Maxima 818-040M FG	818-040M FG	
878-3546	Maxima 834-021M FG	834-021M FG	
878-3547	Maxima 899-031F FG	899-031F FG	
878-3548	Maxima 899-031M FG	899-031M FG	
878-3549	Maxima 909-040M FGK	909-040M FGK	
878-3552	Maxima 801-014F FG	801-014F FG	
878-3553	Maxima 801-016F FG	801-016F FG	
878-3554	Maxima 801-018SC FG	801-018SC FG	
878-3555	Maxima 801-018F FG	801-018F FG	
878-3556	Maxima 801-021SC FG	801-021SC FG	
878-3557	Maxima 801-021F FG	801-021F FG	
878-3558	Maxima 801-029SC FG	801-029SC FG	
878-3559	Maxima 801-029C FG	801-029C FG	
878-3560	Maxima 830L-014SC FG	830L-014SC FG	
878-3562	Maxima 847-014C FG	847-014C FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3563	Maxima 847-014F FG	847-014F FG	ALL LOTS
878-3564	Maxima 856-012SC FG	856-012SC FG	
878-3565	Maxima 858-012C FG	858-012C FG	
878-3566	Maxima 858-014UF FG	858-014UF FG	
878-3569	Maxima 859-014UF FG	859-014UF FG	
878-3571	Maxima 859-016C FG	859-016C FG	
878-3572	Maxima 859-016F FG	859-016F FG	
878-3573	Maxima 859-016UF FG	859-016UF FG	
878-3574	Maxima 860-012SF FG	860-012SF FG	
878-3575	Maxima 860-014SC FG	860-014SC FG	
878-3576	Maxima 860-014F FG	860-014F FG	
878-3577	Maxima 860-014SF FG	860-014SF FG	
878-3578	Maxima 862-010C FG	862-010C FG	
878-3579	Maxima 862-010SF FG	862-010SF FG	
878-3580	Maxima 877K-014SC FG	877K-014SC FG	
878-3581	Maxima 878-012SC FG	878-012SC FG	
878-3582	Maxima 878-014C FG	878-014C FG	
878-3583	Maxima 878K-012SC FG	878K-012SC FG	
878-3584	Maxima 878K-012F FG	878K-012F FG	
878-3585	Maxima 878K-014SC FG	878K-014SC FG	
878-3586	Maxima 879-014SC FG	879-014SC FG	
878-3587	Maxima 879-014F FG	879-014F FG	
878-3588	Maxima 909-040SC FGK	909-040SC FGK	
878-3589	Maxima 909-040C FGK	909-040C FGK	
878-3590	Maxima 368-016SC FG	368-016SC FG	
878-3591	Maxima 368-023UF FG	368-023UF FG	
878-3592	Maxima 379-016SC FG	379-016SC FG	
878-3593	Maxima 379-016C FG	379-016C FG	
878-3594	Maxima 379-016SF FG	379-016SF FG	
878-3595	Maxima 379-016UF FG	379-016UF FG	
878-3596	Maxima 379-018SC FG	379-018SC FG	
878-3597	Maxima 379-018C FG	379-018C FG	
878-3598	Maxima 379-018F FG	379-018F FG	
878-3599	Maxima 379-018SF FG	379-018SF FG	
878-3601	Maxima 379-018UF FG	379-018UF FG	
878-3602	Maxima 379-023UF FG	379-023UF FG	
878-3603	Maxima 392-016F FG	392-016F FG	
878-3604	Maxima 392-016SF FG	392-016SF FG	
878-3605	Maxima 807-016C FG	807-016C FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3606	Maxima 811-033SC FG	811-033SC FG	ALL LOTS
878-3607	Maxima 811-033C FG	811-033C FG	
878-3608	Maxima 811-037SC FG	811-037SC FG	
878-3609	Maxima 811-037C FG	811-037C FG	
878-3610	Maxima 813-014C FG	813-014C FG	
878-3611	Maxima 835-010SC FG	835-010SC FG	
878-3612	Maxima 835-010F FG	835-010F FG	
878-3613	Maxima 835-012SC FG	835-012SC FG	
878-3614	Maxima 835-012F FG	835-012F FG	
878-3615	Maxima 836-012SC FG	836-012SC FG	
878-3616	Maxima 836-012F FG	836-012F FG	
878-3617	Maxima 836KR-012C FG	836KR-012C FG	
878-3619	Maxima 837-012SC FG	837-012SC FG	
878-3620	Maxima 837KR-012SC FG	837KR-012SC FG	
878-3622	Maxima 847KR-016SC FG	847KR-016SC FG	
878-3623	Maxima 848-014C FG	848-014C FG	
878-3624	Maxima 848-018SC FG	848-018SC FG	
878-3625	Maxima 848-018F FG	848-018F FG	
878-3626	Maxima 850-012C FG	850-012C FG	
878-3627	Maxima 850-014SC FG	850-014SC FG	
878-3628	Maxima 850-016F FG	850-016F FG	
878-3629	Maxima 850W-018C FG	850W-018C FG	
878-3630	Maxima 850W-018F FG	850W-018F FG	
878-3631	Maxima 852-012C FG	852-012C FG	
878-3632	Maxima 852-012SF FG	852-012SF FG	
878-3633	Maxima 852-012UF FG	852-012UF FG	
878-3634	Maxima 855-012SC FG	855-012SC FG	
878-3635	Maxima 855-012C FG	855-012C FG	
878-3636	Maxima 855-012F FG	855-012F FG	
878-3637	Maxima 855-014SC FG	855-014SC FG	
878-3638	Maxima 855-014C FG	855-014C FG	
878-3639	Maxima 855-014F FG	855-014F FG	
878-3640	Maxima 862-012UF FG	862-012UF FG	
878-3641	Maxima 862-014SF FG	862-014SF FG	
878-3642	Maxima 862-016F FG	862-016F FG	
878-3643	Maxima 863-012SC FG	863-012SC FG	
878-3644	MAXIMA 863-012UF	863-012UF	
878-3647	Maxima 879K-014SC FG	879K-014SC FG	
878-3648	Maxima 884-012F FG	884-012F FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3649	Maxima 885-012F FG	885-012F FG	ALL LOTS
878-3650	Maxima 888-012C FG	888-012C FG	
878-3651	Maxima 888-012F FG	888-012F FG	
878-3652	Maxima 888-012SF FG	888-012SF FG	
878-3653	Maxima 889-009SF FG	889-009SF FG	
878-3654	Maxima 806-014C FG	806-014C FG	
878-3655	Maxima 813-012C FG	813-012C FG	
878-3656	Maxima 813-012M FG	813-012M FG	
878-3658	Maxima 828-026M FG	828-026M FG	
878-3659	Maxima 828-030M FG	828-030M FG	
878-3661	Maxima 835KR-012C FG	835KR-012C FG	
878-3662	Maxima 835KR-012M FG	835KR-012M FG	
878-3668	Maxima 836-010C FG	836-010C FG	
878-3669	Maxima 836-010M FG	836-010M FG	
878-3671	Maxima 836KR-014C FG	836KR-014C FG	
878-3672	Maxima 836KR-014M FG	836KR-014M FG	
878-3674	Maxima 837-010C FG	837-010C FG	
878-3675	Maxima 837-010M FG	837-010M FG	
878-3677	Maxima 839-014M FG	839-014M FG	
878-3678	Maxima 840-012M FG	840-012M FG	
878-3680	Maxima 840-014M FG	840-014M FG	
878-3681	Maxima 840-016M FG	840-016M FG	
878-3683	Maxima 846KR-016C FG	846KR-016C FG	
878-3684	Maxima 846KR-016M FG	846KR-016M FG	
878-3686	Maxima 847-010C FG	847-010C FG	
878-3687	Maxima 847-010M FG	847-010M FG	
878-3688	Maxima 847-018SC FG	847-018SC FG	
878-3689	Maxima 847-018C FG	847-018C FG	
878-3690	Maxima 847-018M FG	847-018M FG	
878-3691	Maxima 848-010C FG	848-010C FG	
878-3692	Maxima 848-010M FG	848-010M FG	
878-3693	Maxima 848-012C FG	848-012C FG	
878-3694	Maxima 848-012M FG	848-012M FG	
878-3695	Maxima 849-009M FG	849-009M FG	
878-3696	Maxima 849-009F FG	849-009F FG	
878-3698	Maxima 849-010M FG	849-010M FG	
878-3699	Maxima 849-010F FG	849-010F FG	
878-3700	Maxima 849-010SF FG	849-010SF FG	
878-3701	Maxima 852-010M FG	852-010M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3702	Maxima 852-010F FG	852-010F FG	ALL LOTS
878-3703	Maxima 852-010SF FG	852-010SF FG	
878-3704	Maxima 855-025SC FG	855-025SC FG	
878-3705	Maxima 855-025C FG	855-025C FG	
878-3706	Maxima 855-025M FG	855-025M FG	
878-3707	Maxima 856-010M FG	856-010M FG	
878-3708	Maxima 856-021SC FG	856-021SC FG	
878-3709	Maxima 856-021C FG	856-021C FG	
878-3710	Maxima 856-021M FG	856-021M FG	
878-3711	Maxima 856-025SC FG	856-025SC FG	
878-3712	Maxima 856-025C FG	856-025C FG	
878-3713	Maxima 856-025M FG	856-025M FG	
878-3714	Maxima 856L-014SC FG	856L-014SC FG	
878-3715	Maxima 856L-014C FG	856L-014C FG	
878-3716	Maxima 856L-014M FG	856L-014M FG	
878-3717	Maxima 856L-014F FG	856L-014F FG	
878-3718	Maxima 856L-016SC FG	856L-016SC FG	
878-3719	Maxima 856L-016C FG	856L-016C FG	
878-3720	Maxima 856L-016M FG	856L-016M FG	
878-3721	Maxima 856L-016F FG	856L-016F FG	
878-3722	Maxima 856L-018SC FG	856L-018SC FG	
878-3723	Maxima 856L-018C FG	856L-018C FG	
878-3724	Maxima 856L-018M FG	856L-018M FG	
878-3725	Maxima 856L-018F FG	856L-018F FG	
878-3726	Maxima 858-010C FG	858-010C FG	
878-3727	Maxima 858-010M FG	858-010M FG	
878-3728	Maxima 858-010F FG	858-010F FG	
878-3729	Maxima 859-012C FG	859-012C FG	
878-3730	Maxima 859-012M FG	859-012M FG	
878-3731	Maxima 859-012F FG	859-012F FG	
878-3732	Maxima 859-012SF FG	859-012SF FG	
878-3733	Maxima 859-012UF FG	859-012UF FG	
878-3734	Maxima 861-012C FG	861-012C FG	
878-3735	Maxima 861-012M FG	861-012M FG	
878-3736	Maxima 861-012F FG	861-012F FG	
878-3737	Maxima 863-010M FG	863-010M FG	
878-3738	Maxima 863-010F FG	863-010F FG	
878-3739	Maxima 863-014C FG	863-014C FG	
878-3740	Maxima 863-014M FG	863-014M FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3741	Maxima 863-014F FG	863-014F FG	ALL LOTS
878-3742	Maxima 886-012SC FG	886-012SC FG	
878-3743	Maxima 886-012C FG	886-012C FG	
878-3744	Maxima 886-012M FG	886-012M FG	
878-3745	Maxima 909-037SC FGK	909-037SC FGK	
878-3746	Maxima 909-037C FGK	909-037C FGK	
878-3747	Maxima 909-037M FGK	909-037M FGK	
878-3748	Maxima KS1 FG	KS1 FG	
878-3749	Maxima KS2 FG	KS2 FG	
878-3750	Maxima KS3 FG	KS3 FG	
878-3751	Maxima 368-018SC FG	368-018SC FG	
878-3752	Maxima 368-018C FG	368-018C FG	
878-3753	Maxima 368-018M FG	368-018M FG	
878-3754	Maxima 368-018F FG	368-018F FG	
878-3755	Maxima 368-018SF FG	368-018SF FG	
878-3756	Maxima 368-018UF FG	368-018UF FG	
878-3757	Maxima 801-025SC FG	801-025SC FG	
878-3758	Maxima 801-025C FG	801-025C FG	
878-3759	Maxima 806-012C FG	806-012C FG	
878-3760	Maxima 835KR-010C FG	835KR-010C FG	
878-3761	Maxima 836KR-010C FG	836KR-010C FG	
878-3762	Maxima 836KR-010M FG	836KR-010M FG	
878-3763	Maxima 837-016SC FG	837-016SC FG	
878-3764	Maxima 850-010C FG	850-010C FG	
878-3765	Maxima 850-010M FG	850-010M FG	
878-3766	Maxima 850-010F FG	850-010F FG	
878-3767	Maxima 856L-020SC FG	856L-020SC FG	
878-3768	Maxima 856L-020C FG	856L-020C FG	
878-3769	Maxima 856L-020M FG	856L-020M FG	
878-3770	Maxima 859-010C FG	859-010C FG	
878-3771	Maxima 859-014C FG	859-014C FG	
878-3772	Maxima 859-016M FG	859-016M FG	
878-3773	Maxima 860-010F FG	860-010F FG	
878-3774	Maxima 861-014C FG	861-014C FG	
878-3775	Maxima 861-014M FG	861-014M FG	
878-3777	Maxima 862-009M FG	862-009M FG	
878-3778	Maxima 862-009F FG	862-009F FG	
878-3779	Maxima 862-009SF FG	862-009SF FG	
878-3780	Maxima 863-014SC FG	863-014SC FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3781	Maxima 877-010F FG	877-010F FG	ALL LOTS
878-3782	Maxima 877-012F FG	877-012F FG	
878-3783	Maxima 878-016SC FG	878-016SC FG	
878-3784	Maxima 878-016M FG	878-016M FG	
878-3785	Maxima 878K-021SC FG	878K-021SC FG	
878-3786	Maxima 878K-021M FG	878K-021M FG	
878-3787	Maxima 879-012C FG	879-012C FG	
878-3788	Maxima 879-016SC FG	879-016SC FG	
878-3789	Maxima 837KR-014SC FG	837KR-014SC FG	
878-3790	Maxima 837KR-014C FG	837KR-014C FG	
878-3791	Maxima 837KR-016SC FG	837KR-016SC FG	
878-3792	Maxima 837KR-016C FG	837KR-016C FG	
878-3793	Maxima 839-016M FG	839-016M FG	
878-3794	Maxima 847-012SC FG	847-012SC FG	
878-3795	Maxima 849-025SC FG	849-025SC FG	
878-3796	Maxima 849-025C FG	849-025C FG	
878-3798	Maxima 849-025M FG	849-025M FG	
878-3802	Maxima 885-010M FG	885-010M FG	
878-3804	Maxima 885-012SC FG	885-012SC FG	
878-3820	Maxima 885-014SC FG	885-014SC FG	
878-3821	Maxima 885-014C FG	885-014C FG	
878-3822	Maxima 885-014M FG	885-014M FG	
878-3823	Maxima 885-014F FG	885-014F FG	
878-3824	Maxima 909-040F FGK	909-040F FGK	
878-3825	Maxima 369-025C FG	369-025C FG	
878-3826	Maxima 379-023SC FG	379-023SC FG	
878-3827	Maxima 390-016F FG	390-016F FG	
878-3828	Maxima 390-016SF FG	390-016SF FG	
878-3841	Maxima 909-055C FGK	909-055C FGK	
878-3842	Maxima 850-014TC FG	850-014TC FG	
878-3843	Maxima 850-016TSC FG	850-016TSC FG	
878-3845	Maxima 837-014TSC FG	837-014TSC FG	
878-3846	Maxima 856-012TSC FG	856-012TSC FG	
878-3848	Maxima 878K-014TSC FG	878K-014TSC FG	
878-3850	Maxima 847-016TSC FG	847-016TSC FG	
878-3851	Maxima 879-012TC FG	879-012TC FG	
878-3852	Maxima 879-012TSC FG	879-012TSC FG	
878-3853	Maxima 879-014TC FG	879-014TC FG	
878-3854	Maxima 806-018C FG	806-018C FG	

Appendix A			
HSI Product Code	Product Description	Mfr Product Code	Lot Number
878-3855	Maxima 806-018SC FG	806-018SC FG	ALL LOTS
878-3865	Maxima 852-007M-KID	852-007M-KID	
878-8840	Maxima 886-010M FG	886-010M FG	
880-4396	Maxima 830-021M FG	830-021M FG	
900-0915	Maxima 379-009M-KID	379-009M-KID	
900-0916	Maxima 805-010M-KID	805-010M-KID	
900-0917	Maxima 835-008M-KID	835-008M-KID	
900-0918	Maxima 838-007M-KID	838-007M-KID	
900-0919	Maxima 846-012M-KID	846-012M-KID	
900-0921	Maxima 370-023C-FG	370-023C FG	
900-8179	Maxima 880-012F FG	880-012F FG	
900-8180	Maxima 880-012M FG	880-012M FG	
900-8867	Maxima 801-025M-FG	801-025M-FG	
900-8868	Maxima 846-014M-FG	846-014M-FG	
900-8869	Maxima 848-023M-FG	848-023M-FG	
900-8870	Maxima 830L-025M-FG	830L-025M-FG	
900-8871	Maxima 863-018M-FG	863-018M-FG	
900-8872	Maxima 879-016M-FG	879-016M-FG	